

# Manual do Usuário

## Lona Multiuso para Transferência de Paciente

Modelos: EZ-600/600 Plus

### RECOMENDAÇÃO

Antes de usar este produto leia atentamente o Manual do Usuário.

O projeto e aprimoramento deste produto são de acordo com os requisitos do Diretório de Produtos Médicos 93/42/EEC.

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

EZ-600/600 Plus é uma ferramenta auxiliar no manejo de paciente com material antiderrapante e lavável.

Este produto é combinação de plancha flexível com alças e cinto. É muito pratico e seguro para mover pacientes na cama, mudar de lado, levantar para deixar sentado, levantar em pé e transferir da cama para cadeira de roda.

### PRODUTO/ MODELO

#### 【EZ-600】



#### 【EZ-600 Plus】



### ESPECIFICAÇÕES

	<b>EZ-600</b>	<b>EZ-600 Plus</b>
Tipo	Flexível	Flexível
Capacidade (Peso)	300 kg	300 kg
Materiais	100% Nylon	100% Nylon
Dimensões	100cm x 70cm (±3%)	140cm x 70cm (±3%)
Peso	0.62 Kg (±3%)	1.8 Kg (±3%)
Prazo de Validade	Indeterminado	Indeterminado
Certificação	Declaração de CE de acordo com o Diretivo de Produto Médico: 93/42/EEC e FDA	
Ambiente de Operação	Temperatura: 10 ~ 50°C, Umidade: 20 ~ 95% sem condensação	
Ambiente de Armazenagem	Temperatura: 0 ~ 60°C, Umidade: 10 ~ 95% sem condensação	

### APRESENTAÇÃO

Cada embalagem de filme de plástico transparente contém uma unidade.

### INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- O limite de peso é: 300kg para EZ-600/600 Plus.
- Antes de usar este produto certifique se de ter lido toda informação contida neste Manual do Usuário.
- Verifique se alças e cintas estão livres.
- Verifique regularmente as condições e função do produto, principalmente após lavagem.
- Antes de transportar, preste muita atenção em volta de cabeça do paciente se não necessita de um auxilio adicional.
- Antes de transportar, certifique que o cinto de segurança está bem apertado.
- Se detectar qualquer sinal de desgaste ou dano, o uso do produto deve ser suspenso e contate o distribuidor mais próximo.

### CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO/TRANSPORTE


- Armazenar num local fresco, ventilado, seco e ausência de gases nocivos.
- O produto não pode sofrer a exposição direta de raio solar.
- O produto deve ser armazenado ou transportado na embalagem original e não retirá-lo da embalagem, a não ser quando este é utilizado.
- Não colocar um peso excessivo sobre este produto.

## INSTRUÇÕES DE LIMPEZA


- Não esterilizar em alta temperatura.
- Usar sabão ou detergente neutro na limpeza.
- Pode ser lavada na máquina de lavar.
- Antes da lavagem, enrole cinto de segurança e use o saco de lavar.
- Secagem, pode ser torcido e pendurado; ou caso a secagem seja em máquina de secar, utilizar baixa temperatura para assegurar a vida útil do produto.

## IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

### 【EZ-600】

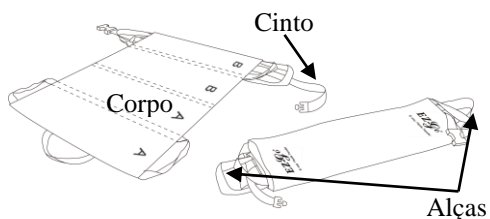


### 【EZ-600 Plus】

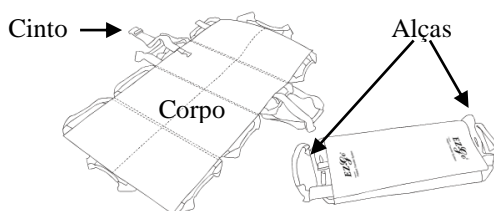


## COMO GUARDAR

Siga a figura abaixo:

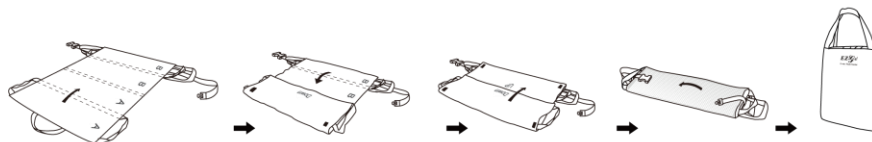


## INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO


### Posicionamento

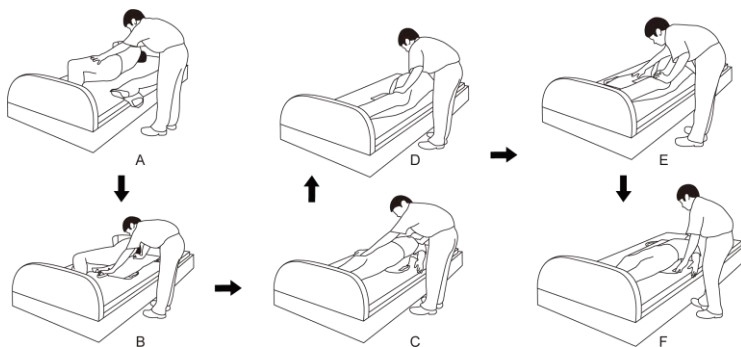

### Mover na cama

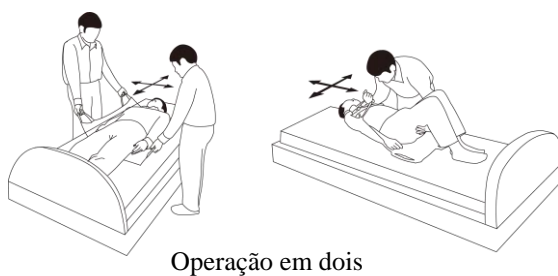


**Virar na cama**

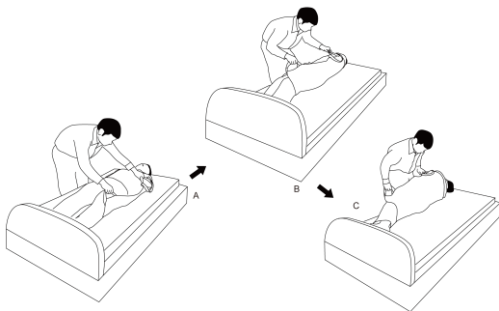


**Posição sentada na cama**




**Girar**

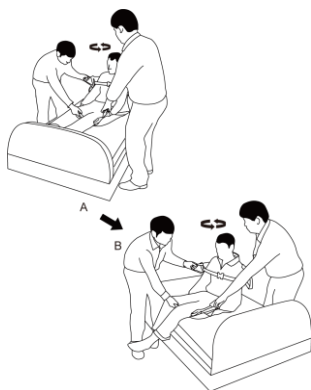


**Levantar (Usar como cinto de Assistência)**

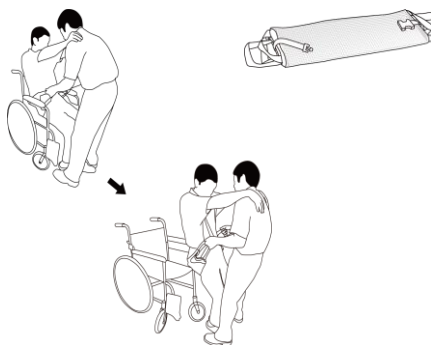

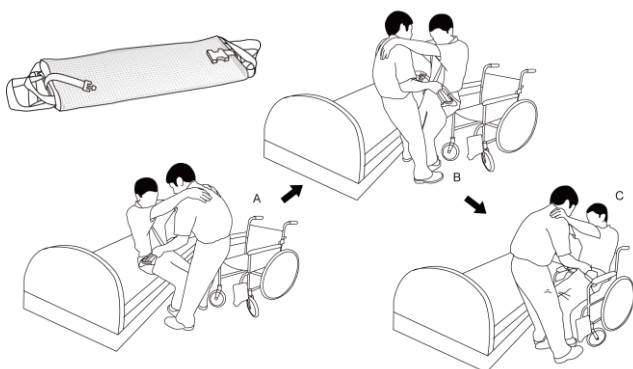

**Transferir de cama para cadeira de roda (Usar como cinto de assistência)**

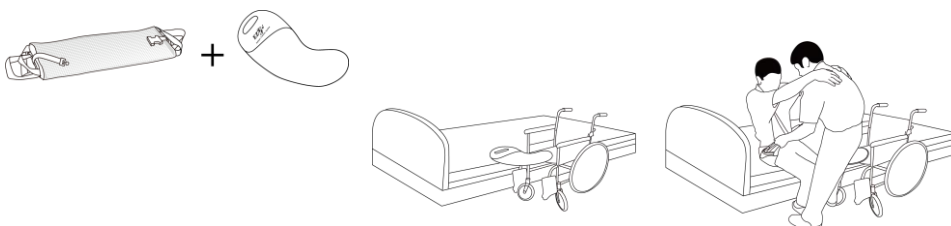

**Transferir de cama para cadeira de roda (Usando como cinto de assistência com prancha EZ-500 Dolphin)**



## INFORMAÇÕES DO FABRICANTE

<b>Fabricante:</b>  <b>GLORIOUS UNION MEDTECH CORP.</b> 5F, No. 15 Lane 548 Rueiguang Rd. Neihu Dist., Taipei, Taiwan TEL: +886-2-2659-2277 - FAX:+886-2-2798-8321 E-mail: <a href="mailto:info@gumt.com.tw">info@gumt.com.tw</a> Website: <a href="http://www.gumt.com.tw">www.gumt.com.tw</a>	<b>Importador/Distribuidor/Assistência Técnica</b>  <b>PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA.</b> Rua Borges Lagoa 423 – 04038-030 Vila Clementino São Paulo/SP Tel.: (11) 2344-1900 <a href="http://www.panamedical.com.br">www.panamedical.com.br</a> CGC: 65.482.309/0001-00 I.E.: 113.142.315.116
<b>Técnico Responsável:</b> Ricardo Toshimitsu Yamaguti CREA 5061354623	<b>Cadastro da ANVISA/MS:</b> ANVISA/MS N° 10234370050

## GARANTIA DO PRODUTO

### Termo de Garantia Legal

(De acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990.)

A empresa **Panamedical Sistemas Ltda.**, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990 vem por meio deste instrumento legal, garantir o direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação de todos os produtos por ela importados e comercializados, pelo prazo de 90 dias, a contar da data de emissão de nota fiscal de compra dos produtos. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme disposto no Parágrafo 3º do Art.26 da Lei 8.078.

Para que o presente Termo de Garantia Legal surta efeito, o consumidor deverá observar as condições abaixo descritas:

- 1) Não permitir que pessoas não autorizadas realizem a manutenção dos materiais em questão.
- 2) Não permitir o uso indevido bem como o mau uso dos materiais em questão.
- 3) Seguir detalhadamente todas as orientações de uso, bem como os cuidados de limpeza e conservação descritos no Manual de Instruções.