

## Manual do Usuário

### Capa de Colchão para Remoção

Modelo: EVC500

#### RECOMENDAÇÃO

Antes de usar este produto leia atentamente este Manual do Usuário.

O projeto e aprimoramento deste produto são de acordo com os requisitos do Diretório de Produtos Médicos 93/42/EEC.

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Capa de Colchão para Remoção, Modelo: EVC500** foi projetado para a evacuação rápida e com segurança de pacientes com mobilidade reduzida ou qualquer tipo de dificuldade de locomoção rápida, durante um caso de emergência em hospitais, clínicas ou domiciliar. Durante a emergência, os pacientes podem permanecer na cama enquanto os cuidadores arrastam rapidamente para longe do perigo. O design de múltiplas alças permite que várias pessoas possam cooperar para a transferência do paciente sendo de fácil uso para todos os tipos de transferência.

- Permite que uma pessoa arraste e evacue o paciente carregando o peso no ombro
- A capa cobre todo o colchão para ser utilizado durante algum tipo de emergências, assim o paciente pode permanecer na cama com segurança, enquanto uma pessoa habilitada rapidamente arrasta o paciente para longe de local.
- 100% feito por Nylon, material altamente abrasivo na parte inferior designado para realizar movimentos fáceis no solo. Possui um tratamento especial no tecido anti-bactérias, anti-ácaros, e retardador de fogo.
- Com alças nas laterais e mais 2 alças nas extremidades superior e inferior facilita o uso na transferência do paciente em vários tipos de posições.
- Possui um conjunto de cinto de segurança um no peito e outro nas pernas e uma bolsa especial para os pés, garantindo que o paciente fique firmemente preso durante a transferência.
- Na bolsa especial para os pés possui espaço suficiente para colocar os pés e todo o equipamento médico essencial do paciente

#### ESPECIFICAÇÕES

Capacidade (Peso) Máximo:	200kg(±3%)
Material:	400D Nylon com proteção anti-microbiana e impermeável
Dimensões (C x L x A):	190cm x 86,5cm x 13,5cm (±3%) (CxLxA)
Peso:	1,6kg(±3%)

## PRODUTO/ MODELO

**APRESENTAÇÃO**

Caixa de papelão com embalagem secundária feita de plástico de polietileno.  
Contendo **Capa de Colchão para Remoção, Modelo: EVC500**


**Advertência / Precaução**

- O limite de peso é de 200kg.
- Antes de utilizar, certifique-se de que não há danos na estrutura, alças, etc, faça uma checagem visual. Não use, se constatar alguma irregularidade, pois pode provocar acidente.
- A limpeza ou higienização pode ser feita usando água, detergente neutro ou álcool 70%. Não exponha à alta temperatura.
- Para limpeza utilize um pano macio e que não solte farpa.


**CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO/TRANSPORTE**

- Armazenar num local fresco, ventilado, seco e ausência de gases nocivos.
- O produto não pode sofrer a exposição direta de raio solar.
- O produto deve ser armazenado ou transportado na embalagem original.
- Não colocar um peso excessivo sobre este produto.

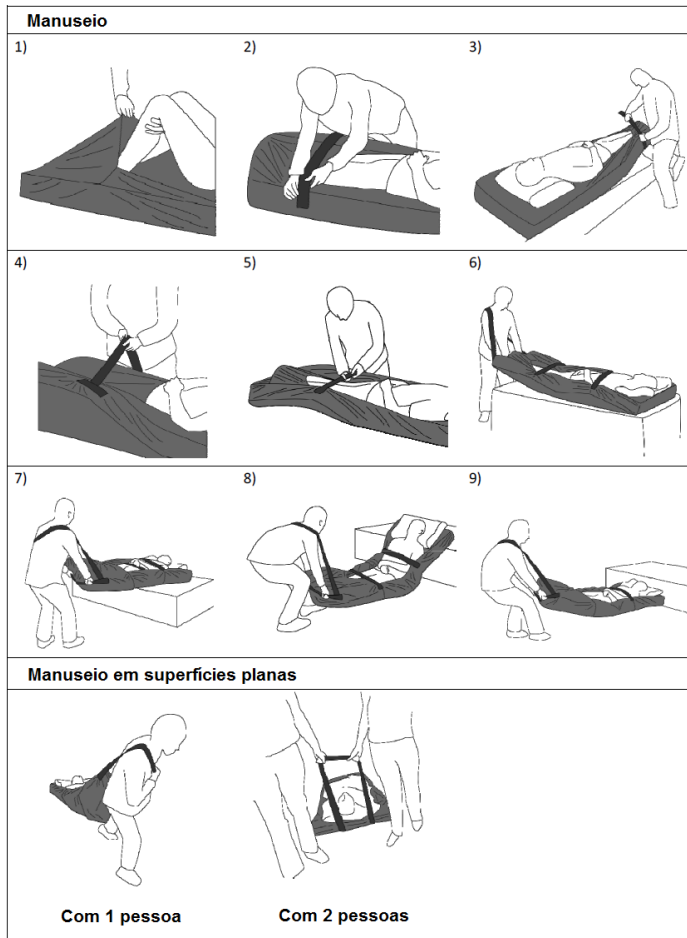

**ANEXO I**  
**Instruções de Uso**

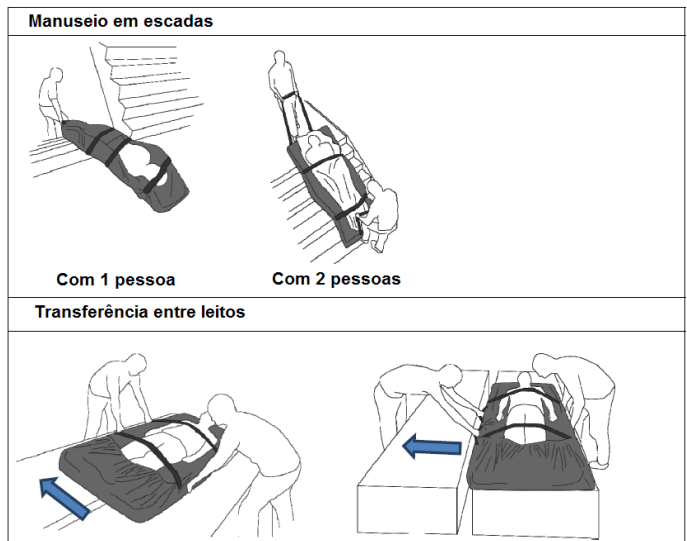

- 1) Coloque os pés do paciente na bolsa
- 2) Prenda o cinto de segurança nas pernas
- 3) Ajuste para que não escape e fique confortável
- 4) Prenda o cinto de segurança na região do peito
- 5) Ajuste para que fique confortável e seguro
- 6) Coloque a alça no ombro
- 7) Puxe o colchão
- 8) Deslize sobre as superfícies
- 9) Arraste até um local seguro



## INFORMAÇÕES DO FABRICANTE

<b>Fabricante:</b>  <b>GLORIOUS UNION MEDTECH CORP.</b> TEL: +886-2-2659-2277 FAX:+886-2-2798-8321 E-mail: <a href="mailto:info@gumt.com.tw">info@gumt.com.tw</a> Website: <a href="http://www.gumt.com.tw">www.gumt.com.tw</a>	<b>Importador/Distribuidor/Assistência Técnica</b>  <b>PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA.</b> <a href="http://www.panamedical.com.br">www.panamedical.com.br</a> CGC: 65.482.309/0001-00 I.E.: 113.142.315.116
<b>Cadastro da ANVISA/MS:</b> ANVISA/MS N° xxxxxxxxxxxx <b>Técnico Responsável:</b> Ricardo Toshimitsu Yamaguti CREA 5061354623	

## GARANTIA DO PRODUTO

**Termo de Garantia Legal**

(De acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990.)

A empresa **Panamedical Sistemas Ltda.**, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990 vem por meio deste instrumento legal, garantir o direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação de todos os produtos por ela importados e comercializados, pelo prazo de 90 dias, a contar da data de emissão de nota fiscal de compra dos produtos. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme disposto no Parágrafo 3º do Art.26 da Lei 8.078.

Para que o presente Termo de Garantia Legal surta efeito, o consumidor deverá observar as condições abaixo descritas:

- 1) Não permitir que pessoas não autorizadas realizem a manutenção dos materiais em questão.
- 2) Não permitir o uso indevido bem como o mau uso dos materiais em questão.
- 3) Seguir detalhadamente todas as orientações de uso, bem como os cuidados de limpeza e conservação descritos no Manual de Instruções.