

## Manual do Usuário - Versão 02

### Almofada Giratória - Modelos: EZ-300/400/410

#### RECOMENDAÇÃO

Antes de usar este produto leia atentamente este Manual do Usuário.

O projeto e aprimoramento deste produto são de acordo com os requisitos do Diretório de Produtos Médicos 93/42/EEC.

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

EZ-300/400/410 é uma almofada giratória em formato circular leve e usada para colocar o paciente na direção desejada e auxiliar na transferência segura de paciente.

EZ-300/400/410 pode ser utilizada no assento do carrinho, cadeira ou cama.

#### PRODUTO/ MODELO

**【EZ-300】**



**【EZ-400】**



**【EZ-410】**



#### ESPECIFICAÇÕES

	<b>EZ-300</b>	<b>EZ-400</b>	<b>EZ-410</b>
Capacidade (kg)	120 kg.	120 kg.	120 kg.
Material	Espuma de alta densidade e base de polietileno rígido	Malha antiderrapante em dois pratos giratórios de polietileno rígido	Malha antiderrapante em dois pratos giratórios de polietileno rígido
Dimensões (Ø)	40 cm	32 cm	40,5 cm
Peso	1.4 Kg	0.8kg	1,2kg
Prazo de Validade	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
Certificação	Declaração de CE de acordo com o Diretivo de Produto Médico: 93/42/EEC		
Ambiente de Operação	Temperatura: 10 ~ 50°C, Umidade: 20 ~ 95% sem condensação		
Ambiente de Armazenagem	Temperatura: 0 ~ 60°C, Umidade: 10 ~ 95% sem condensação		

#### APRESENTAÇÃO

Cada embalagem de filme de plástico transparente contém uma unidade de Almofada Giratória.

#### INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Antes de girar o paciente, certifique se o paciente está sentado no centro da almofada.
- Não girar bruscamente que pode provocar acidente.
- Verifique se a almofada com paciente sentado não está saindo da beira da cama. Caso contrário, poderá causar acidente grave.

#### CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO/TRANSPORTE


- Armazenar num local fresco, ventilado, seco e ausência de gases nocivos.
- O produto não pode sofrer a exposição direta de raio solar.
- O produto deve ser armazenado ou transportado na embalagem original e não o retirar da embalagem, a não ser quando este é utilizado.
- Não colocar um peso excessivo sobre este produto.

#### INSTRUÇÕES DA LIMPEZA

Use água com sabão ou detergente neutro para limpeza.

A capa do EZ-300 pode ser retirada e lavá-la na máquina de lavar.

## INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO - EZ-300

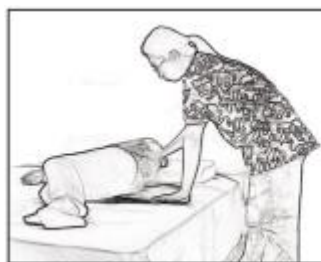

1. Vire o paciente e coloque a placa em baixo do quadril.



2. Levante gentilmente o paciente na posição sentada.



3. Puxe devagar as pernas do paciente e gire paciente na direção desejada.



4. O paciente pode permanecer sentado na beirada da cama.

A mesma operação pode ser realizada para auxiliar o paciente sair do carro ou cadeira.

## INFORMAÇÕES DO FABRICANTE

<p><b>Fabricante:</b>    <b>EZCARE SOLUTION LTD</b>          5F, No. 15 Lane 548 Rueiguang Rd.          Neihu Dist., Taipei, Taiwan          TEL: +886-2-2659-2277          FAX: +886-2-2798-8321          E-mail: info@gumt.com.tw          Website: <a href="http://www.ezcaresolution.com">www.ezcaresolution.com</a></p>	<p><b>Importador/Distribuidor/Assistência Técnica</b>    <b>PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA.</b>          Rua Borges Lagoa 423 – 04038-030          Vila Clementino São Paulo/SP          Tel.: (11) 2344-1900 / 5575-7844  <a href="http://www.panamedical.com.br">www.panamedical.com.br</a>  <a href="mailto:comercial@panamedical.com.br">comercial@panamedical.com.br</a>          CNPJ. 65.482.309/0001-00          I.E.: 113.142.315.116</p>
<p><b>Técnico Responsável:</b>          Ricardo Toshimitsu Yamaguti          CREA 5061354623</p>	<p><b>Cadastro da ANVISA/MS:</b>          ANVISA/MS N° 10234370049</p>

## GARANTIA DO PRODUTO

**Termo de Garantia Legal**

(De acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990.)

A empresa **Panamedical Sistemas Ltda.**, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990 vem por meio deste instrumento legal, garantir o direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação de todos os produtos por ela importados e comercializados, pelo prazo de 90 dias, a contar da data de emissão de nota fiscal de compra dos produtos. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme disposto no Parágrafo 3º do Art.26 da Lei 8.078.

Para que o presente Termo de Garantia Legal surta efeito, o consumidor deverá observar as condições abaixo descritas:

- 1) Não permitir que pessoas não autorizadas realizem a manutenção dos materiais em questão.
- 2) Não permitir o uso indevido bem como o mau uso dos materiais em questão.
- 3) Seguir detalhadamente todas as orientações de uso, bem como os cuidados de limpeza e conservação descritos no Manual de Instruções.